

Fast + Simple
Focused on Veterinary Diagnostics

FASTest® DISTEMPER Strip ad us. vet.

MOQUILLO – enfermedad vírica altamente contagiosa en perros jóvenes

Test rápido para la detección del virus del moquillo canino (CDV) en la secreción ocular o nasal, orina o LCR

Rápido diagnóstico etiológico del patógeno de elevada contagiosidad

Inicio inmediato de tratamiento, profilaxis y medidas higiénicas

Análisis de nuevos animales, perreras

Descarte de infección previa a la vacunación

Análisis de todos los animales de compañía en caso de un brote de moquillo canino



- Fácil análisis en la secreción nasal u ocular, orina o LCR
- Rápida interpretación del resultado después de 10 minutos
- Diagnóstico clínico fiable
- Sensibilidad 98,8% y especificidad 97,7%
- Conservación a temperatura ambiente (15–25 °C)
- Larga vida útil
- Caja de tests compacta con 2 o 10 tests



FASTest[®] DISTEMPER Strip ad us. vet.

El moquillo canino está causado por el virus del moquillo canino (CDV), un morbilivirus de la subfamilia Paramyxovirinae. Afecta perros y otros carnívoros como zorro, lobo, coyote, chacal, hurón, visón, mapache y focas en todo el mundo.

Los animales infectados eliminan el virus por todas las secreciones (por ejemplo saliva, lágrimas o secreción nasal) y excreciones (por ejemplo heces y orina) aprox. a partir del día 8 de infección en adelante.

La infección se puede dar por contacto directo, o indirecto por la ingesta de comida o agua infectada, así como intrauterinamente. Puede afectar a animales de cualquier edad. Sin embargo, están especialmente predispuestos los cachorros de 3-6 meses no vacunados, que han perdido su inmunidad maternal o cachorros más jóvenes que han recibido una concentración de anticuerpos maternos insuficiente.

En el caso de perros jóvenes con fiebre alta hasta 41 °C, pérdida de apetito, vómitos, diarrea y sobre todo, secreción ocular y nasal se debería sospechar moquillo. Los signos clínicos varían según la virulencia de la cepa, las condiciones ambientales, la edad y el estado inmunitario del hospedador. Dependiendo de la viremia y la distribución en diferentes órganos, los síntomas pueden ser respiratorios (tos, disnea), intestinales (diarrea, vómitos), neurológicos (espasmos musculares), cutáneos (almohadillas plantares endurecidas) o una mezcla de éstos. Según la gravedad del transcurso, así como la presencia de infecciones secundarias, la letalidad se encuentra entre un 30 y un 80 %.

El uso de **FASTest[®] DISTEMPER Strip** permite al veterinario un diagnóstico etiológico rápido de moquillo canino, el inicio inmediato del tratamiento, así como la instauración de las medidas de cuarentena prescritas.

Procedimiento



Interpretación



POSITIVO



NEGATIVO



Para obtener una visión general sobre el estado de anticuerpos de un animal infectado, se debería realizar además un **FASTest[®] CDV Ab**. Con ello se puede establecer si la formación de anticuerpos no se ha dado, comienza o ya ha finalizado. Esto permite al veterinario una evaluación pronóstica profunda sobre el curso futuro de la enfermedad. Además el **FASTest[®] CDV Ab** permite determinar el estado de anticuerpos de animales vacunados y con ello planear una estrategia vacunal dirigida.

ES 10-2021

nº de autorización 1399-RD (España) / nº de registro RIP-KD-30 (Ecuador)



Distribución:



Av. Lorenzo de Garaycoa 2511 y Cuenca
Guayaquil - Ecuador
+593-9-87294553 / +593-9-39419696
www.diagnovet.com.ec